


## NeoBond<sup>®</sup>

### TIRAS ADHESIVAS DE HIDROCOLOIDE

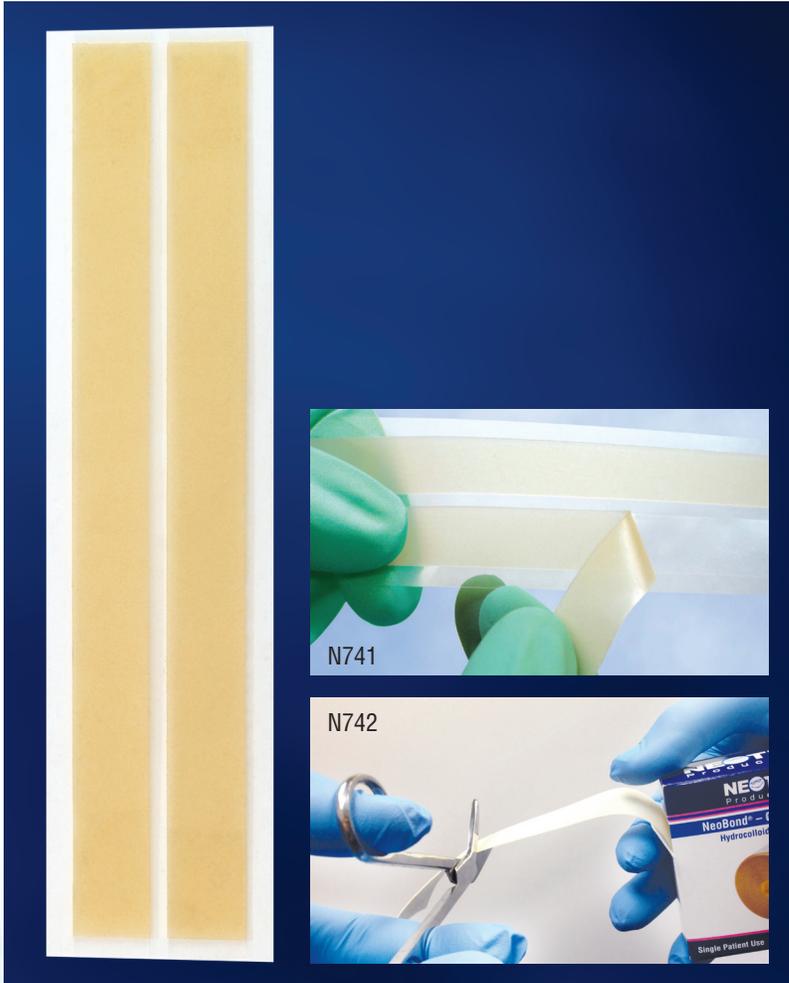


#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alternativa para la piel a la cinta de acrílico
- Desarrollado para colocación a largo plazo
- Ideal para usar con muletas
- No fabricado con látex de caucho natural o DEHP plastificante

Número	Tamaño	HCPCS	Cant./Unidad
N741	1/2" x 6" Tiras	A6234	100/caja*
N742	1" x 15' Rollo	A6234	1/caja

\*50 conjuntos de 2

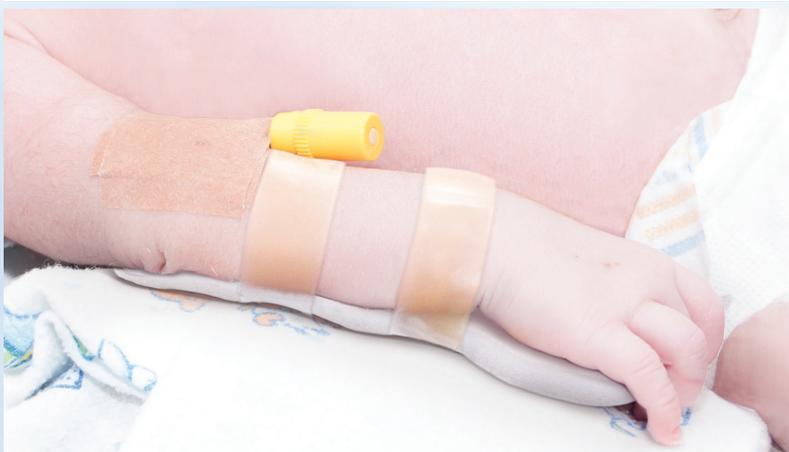

# NeoBond®

## TIRAS ADHESIVAS DE HIDROCOLOIDE

### INDICACIONES DE USO

Las tiras adhesivas de hidrocólido NeoBond están destinadas al uso general como adhesivo médico.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el NeoBond conforme al protocolo hospitalario.

*Nota: es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. NeoBond no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán en forma negativa la adhesión.*

NO USE ALCOHOL.

#### Aplicación

- 1 Antes de quitarle el recubrimiento de plástico, el adhesivo hidrocólido debe calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador químico para talones durante 10 a 15 segundos.
- 2 Despegue el recubrimiento. Envuelva o aplique el NeoBond sobre la piel y el producto (p. ej., sonda de alimentación, férula de extremidades) y sujete en el lugar durante 60 segundos para garantizar una adhesión adecuada. Deseche el recubrimiento cuando termine.

#### Extracción

- 1 Sustituya la tira NeoBond cada 5 días o según el protocolo hospitalario, el que sea el plazo más breve.
- 2 Sature la tira NeoBond con agua o solución salina.
- 3 Retire lentamente el NeoBond de la piel mientras la limpia con agua o solución salina.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrumpa de inmediato si se presenta irritación en la piel.

NeoBond no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán en forma negativa la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Solo para usar en un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

**1-800-966-0500 • neotechproducts.com**

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M659 Rev C