


Neotech ChinStrap[™]

PASEK PODBRÓDKOWY DO WSPOMAGANIA ODDECHU

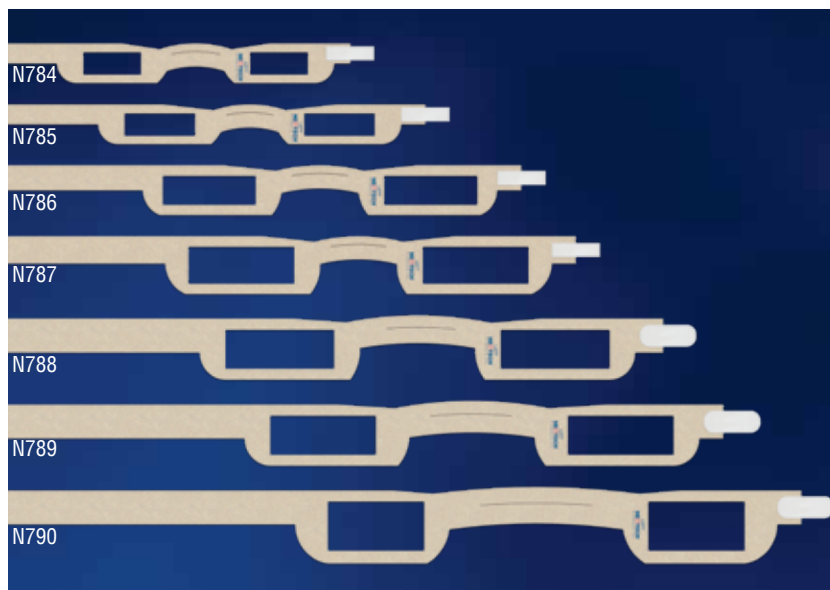

CECHY PRODUKTU

- Mięka, oddychająca, nieszkodliwa dla skóry opaska NeoFoam[®] ułatwia odparowanie potu
- Elastyczny materiał pozwala na minimalne ruchy ust
- Dobre dopasowanie i możliwość regulacji
- Specjalny kształt zapewnia komfort i stabilność
- Otwory na uszy zapobiegające nieprawidłowemu ułożeniu paska
- Ograniczone ryzyko owrzodzenia spowodowanego uciskiem oraz martwicy
- Unikatowy materiał zapobiegający zsunięciu się
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog nr	Przedmiot	Ilość/Jednostka
N784	Nano	20/skrzynka
N785	Mikro	20/skrzynka
N786	Mały	20/skrzynka
N787	Wielki	20/skrzynka
N788	XL	20/skrzynka
N789	Makro	20/skrzynka
N790	Landara	20/skrzynka

Patent USA #10,342,693

Neotech ChinStrap™

PASEK PODBRÓDKOWY DO WSPOMAGANIA ODDECHU

ZASTOSOWANIE

Pasek Neotech ChinStrap służy do utrzymywania ust pacjenta w stanie zamkniętym podczas terapii. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 Wybierz odpowiedni rozmiar paska, mierząc obwód od środka brody przez ucho do potylicy.
- 2 Ułóż pasek Neotech ChinStrap na brodzie, z wcięciem skierowanym w stronę szyi i gładką, białą stroną skierowaną do skóry.
- 3 Ułóż szerszą, dolną część paska pod brodą, a górną część na przedniej stronie brody.
- 4 Przeciągnij pasek w kierunku potylicy, układając odpowiedni segment paska na uszach, i przymocuj rzepem. Strona oznaczona etykietą „LEFT” powinna znajdować się pod lewym uchem pacjenta.

Uwaga: Produkt można przyciąć w celu prawidłowego zamocowania. Należy się upewnić, że pasek nie jest zamocowany zbyt ściśle i nie uciska uszu. Rzep powinien całkowicie nakładać się na pasek.

- 5 Wymieniaj produkt na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

W przypadku zużycia lub zanieczyszczenia należy natychmiast wymienić produkt na nowy.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Pasek Neotech ChinStrap nie jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

