


# NeoSucker® Curved

## DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN ORAL Y NASAL

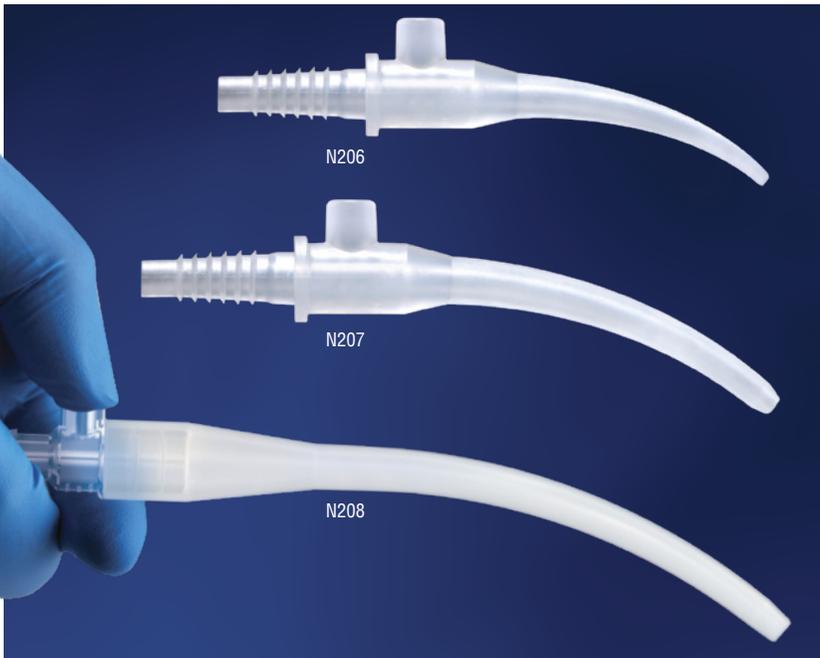

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Forma anatómicamente curvada
- Diseñado para realizar la aspiración con una sola mano
- Boquilla para el pulgar para realizar la aspiración intermitente
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma
- Bueno para pacientes pediátricos mayores o mayores
- No está fabricado con látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado de manera individual

Número	Tamaño	HCPCS	Cant./unidad
N206	Preemie	A4628	50/caja
N207	Standard	A4628	50/caja
N208	XL	A4628	50/caja

Patentes  
#7,635,361; #D590,056;  
#6,958,050; #D474,269



# NeoSucker® Curved

## DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN ORAL Y NASAL

### INDICACIONES DE USO

La NeoSucker está indicada para el uso como boquilla en tubos de succión para la aspiración.

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Conecte el extremo con lengüeta de la punta de succión a la línea de succión.
- 2 Ajuste la succión en la presión adecuada según el protocolo hospitalario o recomendación médica.
- 3 Bloquee el tapón para el pulgar para comenzar la succión.
- 4 Succione la boca o las fosas nasales con succión intermitente. Retire el pulgar de la apertura de pulgar para detener la succión. Vuelva a bloquear la apertura de pulgar para continuar con la succión.
- 5 Succione agua estéril a través de la punta de succión después de cada uso para eliminar los residuos.
- 6 Sustituya la punta o la cubierta de succión cada 24 horas o según el protocolo hospitalario; el plazo que sea más breve.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a un médico o por orden suya.

Solo para uso oral o nasal.

Introducir la punta de succión en la boca o las fosas nasales con demasiada profundidad podría ocasionar un traumatismo en los tejidos.

La punta de succión debe permanecer libre de residuos.

Uso para un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

**1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)**

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M660 Rev B