

NeoGlo[®] Einweg

TRANSILLUMINATOR



MERKMALE & VORTEILE

- Verwendung nur für einen Patienten, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- Erhältlich mit kaltweißen oder roten LED-Leuchten
- Leicht und kompakt
- Illuminiert Venen, Arterien und weitere innere Strukturen
- Netzkabel mit USB-Anschluss
- Keine internen Batterien erforderlich
- Kompatibel mit NeoGlo Sleeve für erhöhten Schutz vor Körperflüssigkeiten
- Preisgünstig
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher hergestellt
- Einzeln verpackt

Katalog	Artikel	Mengeneinheit
N5536RD	Rote Lichter mit 6 'Kabel	10/Kasten
N5536WH	Weißer Lichter mit 6 'Kabel	10/Kasten

NeoGlo® Einweg

TRANSILLUMINATOR

GEBRAUCHSHINWEIS

Der Einweg-Transilluminator NeoGlo ist ein tragbares Gerät für den Gebrauch an Einzelpatienten, das als Lichtquelle vorgesehen ist, um als Unterstützung bei der Untersuchung von Patienten Licht durch Gewebe zu strahlen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Nehmen Sie das NeoGlo aus der Verpackung. Schieben Sie es, falls verwendet, in den NeoGlo Sleeve.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an einen Laptop, eine tragbare Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine sonstige USB-Stromquelle an.

Hinweis: Achten Sie beim Einstecken des Kabels darauf, dass das Licht nicht auf die Augen anwesender Personen gerichtet ist.
- 3 Halten Sie das NeoGlo an die Haut oder unter die zu untersuchende Stelle.

Hinweis: Dunkeln Sie die Raumbelichtung ab für effektivste Beleuchtung.

Vorsichtsmaßnahme: Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück.
- 4 Trennen Sie das Gerät bei Nichtverwendung vom Stromnetz.
- 5 Reinigen Sie das NeoGlo nach jedem Gebrauch mit einem mit Alkohol getränkten Tuch oder mit CaviWipe™.
- 6 Recyceln oder entsorgen Sie das NeoGlo gemäß den örtlichen und bundesstaatlichen Vorschriften.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Bei längerem Gebrauch kann sich die Oberfläche des NeoGlo erwärmen. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück.

Vermeiden Sie mit dem NeoGlo direkten Hautkontakt, wenn der Patient nicht unter der unmittelbaren Aufsicht einer medizinischen Fachkraft steht.

Verwenden Sie das Gerät mit äußerster Vorsicht bei Frühgeborenen sowie bei empfindlicher und verletzter Haut.

Das USB-Kabel kann eine potenzielle Strangulationsgefahr darstellen.

Leuchten Sie nie direkt in die Augen.

Tauchen Sie das NeoGlo nicht in Flüssigkeiten ein.

Sterilisieren Sie das NeoGlo nicht im Autoklaven. Wenn das Gerät Dampf oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wird, kann dies einen Ausfall der Elektrik zur Folge haben.

Entsorgen Sie das NeoGlo gemäß den lokalen Vorschriften für elektrische Produkte.

Nur für einen Patienten verwenden.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M733 Rev A